



AmpliCall 10, art nr 273002

Innehåll

Inledning.....	2
Översikt.....	3
Framsida	3
Baksida	3
Installation	4
Placering.....	5
Montering på vägg.....	5
Placering på bord.....	5
Ställa in larm.....	5
Volymkontroll.....	5
Tonkontroll (3 lägen)	5
Batteribyte	6
Huvudenhet.....	6
Säkerhetsföreskrifter och garanti	6
Underhåll och skötsel.....	6
Felsökning	6
Teknisk information och service	7
Miljö och återvinning.....	7
Tillbehör.....	7

Inledning


Tack för att du har valt att köpa en AmpliCall 10 telefonsignalsindikator som underlättar för dig med nedsatt hörsel att höra telefonen. Vi hoppas att du kommer att bli nöjd med produkten. AmpliCall 10 har akustisk och optisk indikering för att underlätta för hörselskadade att uppfatta telefonsignalen. Den akustiska signalen har volymkontroll. AmpliCall 10 är anpassad för nät- eller batteridrift. Vänligen läs igenom hela bruksanvisningen innan du använder produkten.

Förpackningen innehåller:


- AmpliCall 10 inkl bordsställ
- Nätadapter
- Batterier

Översikt


Framsida

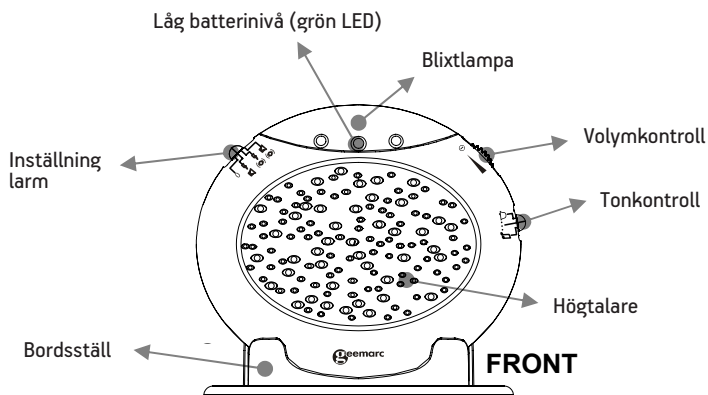

Baksida

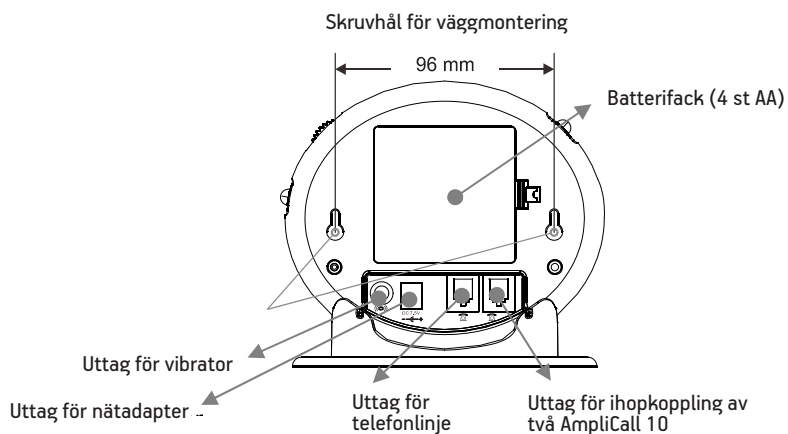

Installation

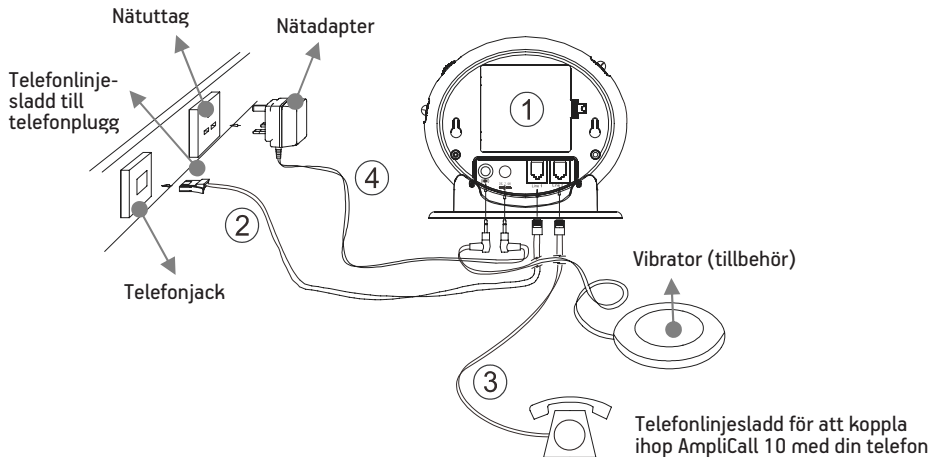

1. Sätt in 4 st AA batterier i batterifacket, om du vill ha backup vid ev. strömavbrott
2. Anslut telefonlinjesladden till AmpliCall 10
3. Anslut andra änden av telefonlinjesladden till medföljande dubbelplugg
4. Ta bort din telefon ur telefonjacket och anslut telefonpluggen till dubbelpluggen
5. Anslut dubbelpluggen till telefonjacket
6. För nätdrift. Anslut nätadaptern till AmpliCall 10 och sedan till eluttaget. Batterierna fungerar då som back-up vid eventuellt strömavbrott.
7. Anslut vibratorn (tillbehör) om du beställt en sådan. Vibratorn vibrerar när telefonen ringer och kan placeras under en kudde eller stolsdyna
8. Om du beställt 2 st AmpliCall 10, för att koppla ihop dom, så gör du det med den andra telefonlinjesladden

Placering

Montering på vägg

Vill du sätta upp AmpliCall 10 på väggen, borrar du två horisontella hål med 96 mm avstånd och låter skruvarna sticka ut ungefär 5 mm från väggen.

Placering på bord

Om du vill placera AmpliCall 10 på bordet, sätter du fast den i bordsstället och ställer den på bordet.

Ställa in larm

Välj larmtyp genom att ställa in på önskad larmtyp:

- larm avstängt
- blixtlampa och akustisk signal
- blixtlampa och vibrator (om vibrator är ansluten, tillbehör)
- akustisk signal och vibrator (om vibrator är ansluten, tillbehör)

Volymkontroll

Används för att justera nivån på den akustiska signalen från telefonsignalsindikatorn.

Tonkontroll (3 lägen)

Ställ in tonkontrollen i det läge som du upplever som bäst för dig.

Batteribyte

Huvudenheter

När indikatorn för batterinivå blinkar rött bör batterierna bytas.

OBS! Dra ur alla sladdar innan du byter batterier.

Öppna batteriluckan, sätt in 4 st AA batterier och stäng luckan till batterifacket.

Säkerhetsföreskrifter och garanti

Observera att produktgarantin ej omfattar fel som uppstått genom ingrepp i produkten, ovarsamhet, felaktig inkoppling/montering eller underhåll.

Bo Edin AB ansvarar inte för störningar från radio eller TV, inte heller för skada som produkten orsakar på fast eller lös egendom eller följderna av sådan skada.

Underhåll och skötsel

AmpliCall 10 kräver normalt sett inget underhåll. Om enheterna skulle bli smutsiga, torka dem med en fuktig trasa. Använd inga lösningsmedel eller starka rengöringsmedel.

Byt alltid ut gamla eller svaga batterier.

Använd inte produkten med annan nätdapter än den som levereras med produkten.

Hantera produkten med varsamhet för att förlänga livstiden.

Felsökning

Vänligen kontrollera följande om din AmpliCall 10 inte fungerar:

Om AmpliCall 10 inte ringer/blinkar vid inkommande telefonsamtal, eller om den inte upphör att ringa/blinka, eller om vibratorn inte upphör att vibrera:

1. Kontrollera att AmpliCall 10 är kopplad till nätuttaget.
2. Kontrollera att AmpliCall 10 är ansluten till telejacket.
3. Vid batteridrift, kontrollera att batteriet sitter rätt.
4. Kontrollera att volymkontrollen inte står i läge 0.

LED-lampan för låg batterinivå blinkar när nätadaptern är ansluten.

1. Kontrollera batterierna.
2. Dra ur nätadaptern och vänta i 10 minuter tills du ansluter den igen.

Vibratorn är ansluten till AmpliCall 10, men den vibrerar ej vid inkommande samtal.

1. Kontrollera att vibratorn är ansluten och att kontakten inte är skadad.
2. Kontrollera att du har ställt rätt typ av alarm (vibrator aktiverad)

Vänligen kontakta försäljningsstället/audionommottagningen om AmpliCall 10 trots ovanstående åtgärder inte fungerar. För bästa handläggning rekommenderar vi att ni har kvitto/faktura tillhands.

Teknisk information och service

För kompletterande upplysningar hänvisar vi till datablad/broschyr och CE-certifikat som kan laddas ner från Dokumentarkiv på www.edin.se.

Vid behov av ytterligare teknisk information, kontakta försäljningsstället eller Bo Edin AB på support@edin.se.

Miljö och återvinning



Släng förbrukade batterier/produkt enligt gällande miljöföreskrifter.

Bo Edin AB är anslutna till FTI (fd REPA) och El-kretsen.

Om du följer ovanstående önskemål om återvinning medverkar du till en bättre miljö.

Tillbehör

Art nr	Beskrivning
--------	-------------

273062	Vibrator
--------	----------

Återförsäljare

Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter. 1969 lanserade vi världens första slingförstärkare med true constant current under varumärket Univox®. Vårt mål är att med en hög servicegrad erbjuda våra kunder högkvalitativa hörselprodukter genom att ständigt söka nya vägar för att få fram förbättrade produkter ur både användar- och miljösynpunkt.

Bo Edin AB, Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö

| www.edin.se

| www.horbutiken.se /
www.hoerbutiken.se

Hearing excellence since 1965

