

Inledning

Tack för att du har valt att köpa en Univox HDA-2M Digital-/analogomvandlare från Bo Edin AB. Vi hoppas att du kommer att bli nöjd med produkten.

Vi rekommenderar att du läser igenom hela bruksanvisningen före installation och användning.

En digital-/analogomvandlare används om du har en analog slingförstärkare, trådlösa hörlurar eller halsslinga som saknar digital ljudingång, samtidigt som din TV (eller annan digital ljudkälla) saknar analog ljudutgång.

Börja med att kontrollera att den utrustning du skall ansluta till omvandlaren är avstängd.

Innehåll i förpackningen

- Digital-/analogomvandlare (1.)
- Optisk kabel (2.)
- Nätadapter (3.)

I vissa produktpaket ingår en audiokabel.



(1.)




(2.)



(3.)

Översikt

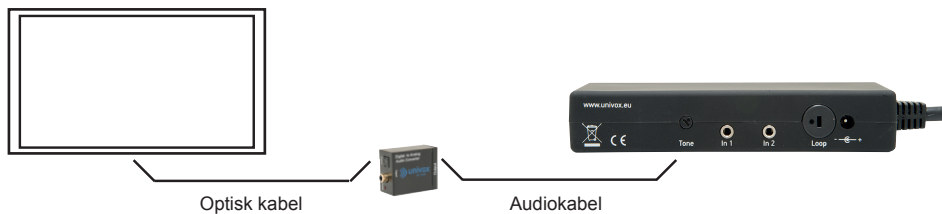


Anslut omvandlaren till TV-n

1. Ta av plastskyddet från anslutningskontaktarna på den optiska kabeln.




2. Anslut ena änden till uttaget märkt **Toslink** på omvandlaren och den andra änden i motsvarande uttag på TV-n. På TV-n kan uttaget vara märkt med **Toslink** alternativt **Optical**.

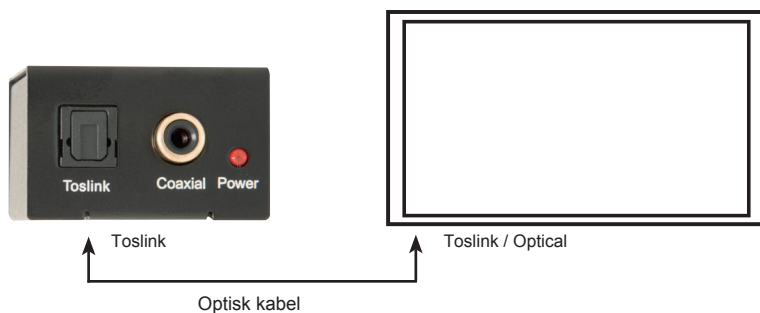

Anslut omvandlaren till slingförstärkaren (eller sändarenheten till dina trådlösa hörlurar/halsslinga)


Använd den audiokabel som följer med slingförstärkaren/sändarenheten eller som levererades med digital-/analogomvandlaren.

1. Anslut den röda och vita pluggen i det röda och vita uttaget på omvandlaren (R/L).
2. Anslut den andra änden i ljudingången (3,5 mm) på slingförstärkaren/sändarenheten till dina trådlösa hörlurar/halsslinga. Ingången på slingförstärkaren/sändarenheten är märkt med **IN** eller **AUDIO IN**.

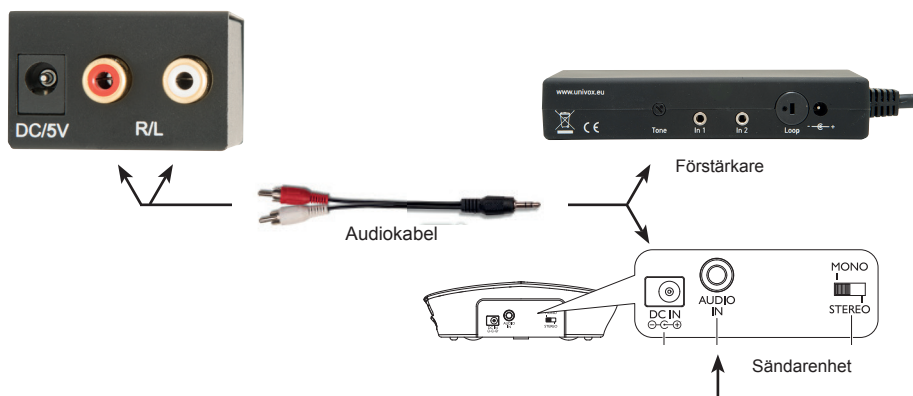

Anslut omvandlaren till eluttaget

1. Anslut nätadaptern, som medföljer i förpackningen, till uttaget märkt DC/5V på omvandlaren och den andra änden i eluttaget.
2. Anslut slingförstärkaren/sändarenhetens nätadapter till eluttaget enligt bruksanvisningen för respektive produkt.

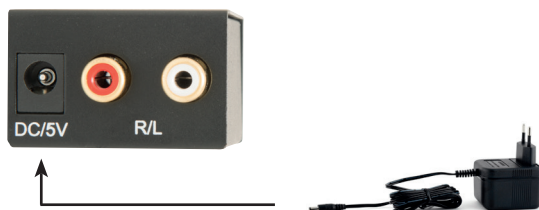

Säkerhetsföreskrifter/Garanti

Observera att produktgarantin inte omfattar fel som uppstått genom ingrepp i produkten, ovarsamhet eller felaktig inkoppling/montering.

Använd inte produkten med annan nätadapter än de som anges i denna bruksanvisning.

Underhåll och skötsel

Hantera produkten med varsamhet för att förlänga livstiden.

Placera inte produkten där den utsätts för starkt solljus, element eller andra värmealstrande källor, regn, vatten eller fuktiga omgivningar.

Om produkten skulle bli smutsig, torka den då med en lätt fuktad trasa (ej våt!).

Använd inga lösningsmedel eller starka rengöringsmedel.

Felsökning

Kontrollera att alla kontakter sitter i ordentligt. Du kan prova att ta ur dem och sätta i dem igen. Vänligen kontakta försäljningsstället om produkten trots dessa åtgärder inte fungerar.

Teknisk information och service

För kompletterande upplysningar hänvisar vi till datablad/broschyr och CE-certifikat som kan laddas ner från www.edin.se.

Vid behov av ytterligare teknisk information, kontakta försäljningsstället eller Bo Edin AB på support@edin.se.

Om produkten, trots felsökning i enlighet med bruksanvisningen, inte fungerar skall den lämnas till försäljningsstället.

Produkt som är köpt direkt av Bo Edin AB skall sändas med företagspaket eller motsvarande till: Bo Edin AB, Förrådsvägen 2B, 181 41 Lidingö. Märk försändelsen med SERVICE.

Bifoga ett brev med namn, adress, telefonnummer och felbeskrivning tillsammans med kvitto eller faktura i försändelsen.

Miljö och återvinning

Släng förbrukad produkt enligt gällande miljöföreskrifter.

Bo Edin AB är anslutna till FTI (fd REPA) och EI-kretsen.

Om du följer ovanstående önskemål om återvinning medverkar du till en bättre miljö.

Tillbehör

Art nr	Beskrivning
281041R3	HDA-2M Digital-/analog omvandlare inkl optisk kabel och audiokabel RCA-3,5mm
281041RC	HDA-2M Digital-/analog omvandlare inkl optisk kabel och audiokabel RCA-RCA

Noteringar

Återförsäljare



Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter. 1969 lanserade vi världens första slingförstärkare med true constant current under varumärket Univox®. Vårt mål är att med en hög servicegrad erbjuda våra kunder högkvalitativa hörselprodukter genom att ständigt söka nya vägar för att få fram förbättrade produkter ur både användar- och miljösynpunkt.

Bo Edin AB | Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö
Besök | Förrådsvägen 2 B, 181 41 Lidingö

Tel 08-767 18 18
Fax 08-767 18 20

E-post info@edin.se
Internet edin.se • univox.eu

Hearing excellence since 1965

