

# PhotoPHONE 100

Telefon med siffer- och fotoknappar, optisk indikator,  
högtalare och inbyggd hörslinga

Bruksanvisning



PhotoPHONE 100, art nr 273027

# Innehåll

Introduktion .....	3
Översikt .....	4
Före första användning .....	6
Anslut telefonen .....	6
Ställ in ringsignalen .....	6
TBR .....	6
Justera volym och ton .....	6
Högtalare .....	8
Använda telefonen.....	9
Ringa ett samtal.....	9
Ringa ett samtal med högtalaren.....	9
Svara i telefonen .....	9
Återuppringning senast slagna nummer.....	10
Sekreteress .....	10
För personer med hörapparat .....	10
R-tjänster/Flash signal/optisk indikator .....	10
Spara telefonnummer i minnet.....	10
Ringa från en minnesknapp .....	11
Felsökning .....	12
Teknisk information och service .....	13
Miljö och återvinning .....	13
Säkerhetsföreskrifter/Garanti .....	13
Underhåll och skötsel.....	13
Anteckningar .....	14

# Introduktion

Tack för att du har valt att köpa en PhotoPHONE 100 telefon som underlättar för dig med nedsatt hörsel. Vi hoppas att du kommer att bli nöjd med den.

Om du använder hörapparat, ställ in hörapparaten i T-läge (teleslinga) för att utnyttja den inbyggda teleslingan i luren.

Vänligen läs igenom hela bruksanvisningen innan du använder telefonen.

## **Varning!**

Denna telefon är anpassad för personer med nedsatt hörsel och är försedd med en volymkontroll för individuella inställningar. Det är viktigt att telefonen är ställd på den lägsta nivån för respektive användare och att varje användare känner till denna funktion.


## **OBS!**

För att minska risken för att telefonen förstörs av blixtnedslag bör den kopplas ur vid kraftiga åskoväder.



## **Förpackningens innehåll**

- 1 telefon
- 1 telefonlur
- 1 telefonlursladd
- 1 linjesladd
- 1 telefonplugg
- 1 monteringsbricka för att fästa telefonen på väggen

# Översikt

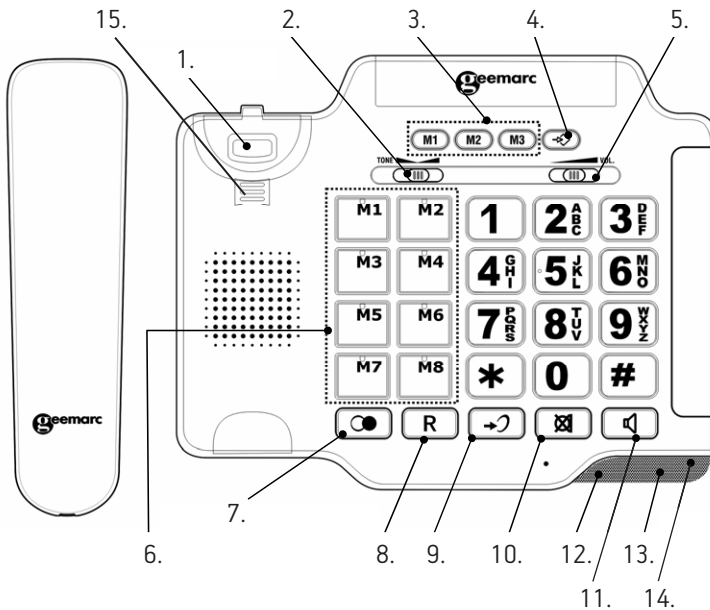

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| 1. Linjebrytare                             | 9. Extra förstärkning          |
| 2. Tonkontroll                              | 10. Sekretessknapp             |
| 3. Snabbnummerknappar M1-M3                 | 11. Aktiveringsknapp högtalare |
| 4. Spara-knapp för snabb- och kortnummer    | 12. Förstärkning aktiverad     |
| 5. Volymkontroll                            | 13. Sekretess aktiverad        |
| 6. Kortnummerknappar                        | 14. På (samtal pågår)          |
| 7. Återuppringning senast slagna nr         | 15. Telefonlurfäste            |
| 8. R-knapp (används för vissa teletjänster) |                                |

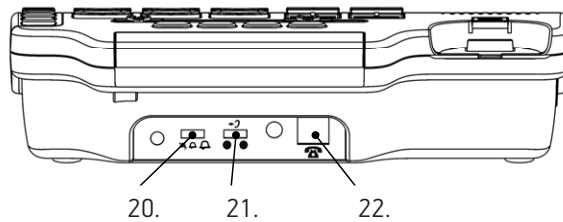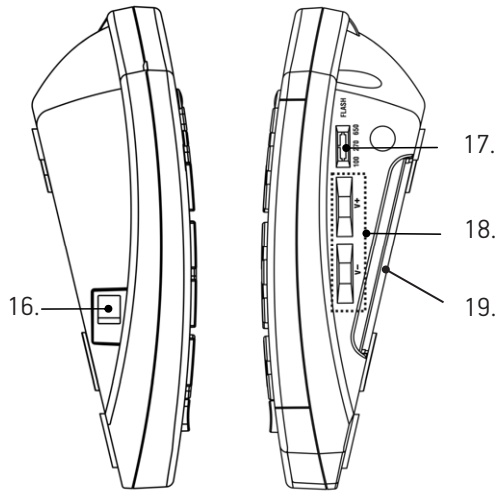

- 16. Anslutning lures sladd
- 17. Omkopplare TBR, ska alltid vara inställd på 100 i Sverige
- 18. Volymkontroll högtalare
- 19. Utdrag bar lista för att skriva upp sparade nummer på minnesknapparna
- 20. Volym ringsignal, stäng av ringsignal
- 21. På/Av extra förstärkning
- 22. Anslut telefonlinjesladd

# Före första användning

## Anslut telefonen

Anslut telefonluren till telefonen med den medföljande lursladden. Anslut lursladden till telefonluren och den andra änden i uttaget på telefonens vänstra sida.

Anslut därefter telefonens linjesladd till telefonen och därefter till telefonpluggen och sedan till telefonjacket. Uttaget för linjesladden finns på telefonens baksida.

### Montera telefonen på väggen

Skjut upp lurfästet (15), vänd den ett halvt varv och sätt tillbaka det i telefonen igen. Lurfästet sticker nu upp en liten bit, detta gör att luren fästs på telefonen när den sitter på väggen.

Sätt skruvarna 8 cm från varandra i höjdlid och låt dem sticka ut 6-7mm från väggen. Fäst brickan på telefonens undersida och för telefonen mot skruvarna och skjut telefonen nedåt för att säkra upphängningen.

## Ställ in ringsignalen

Ringsignalen (19) kan ställas in i 3 lägen via omkopplaren på baksidan av telefonen:

låg – medel – stark.

## TBR

TBR skall vara inställd på 100ms i Sverige (fabriksinställning).

## Justera volym och ton

Du kan justera volymen i luren under ett telefonsamtal genom att dra volymkontrollen på telefonens ovansida (5). Volymen minskas när du drar den åt vänster och ökas när du drar den åt höger.

Du kan öka volymen ytterligare genom att trycka på knappen för extra förstärkning (9).

## Extra förstärkning - påslagen (21)

Extra förstärkning av volym och ton aktiveras automatiskt varje gång du använder telefonen. En indikeringslampa lyser och visar att extra förstärkning är på.

Trycker du ner förstärkarknappen (9) under ett samtal stänger du av funktionen med extra förstärkning för volym- och tonkontroll, men du kan justera volymen på telefonens ovansida med volymknappen (5).

Det spelar ingen roll hur många gånger du trycker på förstärkarknappen (9) under ett samtal. Nästa gång du lyfter luren för att ringa, så är förstärkningen aktiverad.

## Extra förstärkning - avstängd (21)

Funktionerna extra förstärkning för volym- och tonkontroll är nu avstängda och indikeringslampan för förstärkning är därmed släckt.

Trycker du ner förstärkarknappen (9) en gång under ett samtal aktiverar du extra förstärkning för volym- och tonkontroll och då tänds indikeringslampan för extra förstärkning.

Trycker du ner förstärkarknappen (9) en gång till under samma samtal stänger du av extra förstärkning för volym- och tonkontroll och då släcks indikeringslampan för extra förstärkning.

Det spelar ingen roll hur många gånger du trycker på förstärkarknappen (9) under ett samtal. Nästa gång du lyfter luren för att ringa, så är förstärkningen avstängd.

## Tonkontroll

Om extra förstärkning är påslagen, så kan du även justera tonen (2). Du kan öka eller minska låga och höga ljud med tonkontrollen, som sitter på telefonens ovansida.

Basen kan du öka med max +10dB och diskanten kan du öka med max +10dB, se bild.



### Notera

att tonkontrollen fungerar inte om den inkommande extra förstärkningen är avstängd.

# Högtalare

Du kan justera högtalarens volym med volymkontrollerna V+ och V-, på höger sida av telefonen.



# Använda telefonen

## Ringa ett samtal

Lyft av luren på vanligt sätt. Slå numret genom att använda knapparna. För att avsluta samtalet, lägg på luren.

## Ringa ett samtal med högtalaren

Tryck på högtalar-knappen (11) och invänta ton. Slå numret genom att använda knapparna. För att avsluta samtalet, tryck högtalar-knappen igen.

För att aktivera högtalar-funktionen under ett samtal, trycker du på högtalar-knappen och lägger på luren samtidigt. Du avslutar högtalar-funktionen genom att lyfta luren.

### **Notera**

att enbart en person i taget kan prata i telefonen när högtalar-funktionen är aktiverad, dvs prata ej samtidigt som den som ringer upp.

Mikrofonen är helautomatisk, vilket gör att när man slutar prata så stängs mikrofonen av och telefonen övergår i lyssnarläge. Funktionen berörs av det inkommande samtalets ljudvolym och det är viktigt att inga andra ljudkällor, t ex musik, finns i telefonens omedelbara närhet, eftersom det ljudet styr den automatiska mikrofonen-funktionen så att telefonen inte övergår i lyssnarläge.

## Svara i telefonen

Vid inkommande samtal, ringer telefonen på vanligt sätt och lampan (14) tänds.

Lyft luren och svara. Avsluta samtal på vanligt sätt genom att lägga på luren.

### **Svara i telefonen med högtalar-funktionen**

Tryck på högtalar-knappen (11) och svara. Avsluta samtal genom att trycka på högtalar-knappen (11) igen.

## Återuppringning senast slagna nummer

Lyft luren eller tryck på högtalar-knappen (11). Tryck på återuppringningsknappen (7), så slår telefonen det senast slagna telefonnumret automatiskt.

## Sekretess

När du vill prata med någon i rummet, utan att personen i telefonen ska höra vad som sägs, så kan du ställa telefonen i sekretess-läge genom att trycka på sekretess-knappen (10). Tryck åter på sekretess-knappen, för att avsluta funktionen.

## För personer med hörapparat



Den här telefonen är anpassad för personer som har nedsatt hörsel. Sätt hörappraten i T-läge för att lyssna via slingan som är inbyggd i luren.

## R-tjänster/Flash signal/optisk indikator

R-knappen kan användas för att använda tjänster som din telefonoperatör erbjuder, t ex att låta samtal vänta eller koppla samtal vidare till en annan intern anknötning. För att detta ska fungera måste TBR-knappen (17) stå i läge 100. Mer information om vilka tjänster du kan använda, får du av din telefonoperatör.

## Spara telefonnummer i minnet

Det finns totalt 11 minnesknappar, 3 snabbnummerknappar M1-M3 (3) och 8 bildknappar (6). Du kan skjuta in en bild i bildknapparna (ovanifrån) för vilket telefonnummer du sparar på knappen, som stöd för minnet. Gör så här för att spara ett telefonnummer på en minnesknapp:

1. Lyft luren
2. Tryck på spara-knappen, som sitter upptill på telefonens ovansida (4). Linjeton hörs under programmering.
3. Slå det telefonnummer som du vill spara (max 32 siffror)
4. Använd återuppringningsknappen (7) för att spara ett mellanslag, om det krävs
5. Tryck på den minnesknapp, där du vill spara telefonnumret
6. Tryck på spara-knappen igen. Telefonnumret är nu sparat.

När du sparar ett telefonnummer på en minnesknapp, så tar du även bort ett gammalt telefonnummer, om det redan fanns ett sparat telefonnummer på den knappen.

Du kan skriva upp vilka telefonnummer som du sparat i den utdragbara listan (19) som kan dras ut på telefonens högra sida.

## Ringa från en minnesknapp

1. Lyft luren
2. Tryck på en minnesknapp med ett sparat telefonnummer
3. Telefonen ringer upp telefonnumret automatiskt

# Felsökning

## Telefonen ringer inte

- Kontrollera att telefonlinjesladden är korrekt inkopplad och inte är skadad.
- Koppla in en annan telefon i telefonjacket/-uttaget och prova den, för att få svar på om det är telefonen eller anslutningen till ditt telefonjack/-uttag som det är fel på.
- Det kan vara för många telefonprodukter som är kopplade till ett och samma telefonjack/-uttag, t ex ytterligare en telefon, modem eller fax. Kontakta din nätverksoperatör för att felsöka och få svar på hur många produkter du har avtal på och kan använda.
- Kontrollera att inte telefonens ringsignal inte är avstängd (20).

## Telefonen är tyst, ingen ton hörs i luren

- Kontrollera att telefonlinjesladden är korrekt inkopplad och inte är skadad .
- Kontrollera att lursladden är korrekt inkopplad och inte är skadad.
- Koppla in en annan telefon i telefonjacket/-uttaget och prova den, för att få svar på om det är telefonen eller anslutningen till ditt telefonjack/-uttag som det är fel på.
- Det kan vara för många telefonprodukter som är kopplade till ett och samma telefonjack/-uttag, t ex ytterligare en telefon, modem eller fax. Kontakta din nätverksoperatör för att felsöka och få svar på hur många produkter du har avtal på och kan använda.

Vänligen kontakta försäljningsstället om telefonen trots ovanstående åtgärder inte fungerar.

# Teknisk information och service

För kompletterande upplysningar hänvisar vi till datablad/broschyr och CE-certifikat som kan laddas ner från Dokumentarkiv på [www.edin.se](http://www.edin.se).

Vid behov av ytterligare teknisk information, kontakta försäljningsstället eller Bo Edin AB på [support@edin.se](mailto:support@edin.se).

## Miljö och återvinning

Släng förbrukad produkt enligt gällande miljöföreskrifter.

Bo Edin AB är anslutna till FTI (fd REPA) och El-kretsen.

Om du följer ovanstående önskemål om återvinning medverkar du till en bättre miljö.



## Säkerhetsföreskrifter/Garanti

Observera att produktgarantin ej omfattar fel som uppstått genom ingrepp i produkten, ovarsamhet, felaktig inkoppling/montering eller underhåll.

Tillverkaren ansvarar inte för störningar från radio eller TV vid användning av produkten.

## Underhåll och skötsel

Hantera produkten med varsamhet för att förlänga livstiden.

Placera inte produkten där den utsätts för regn, vatten eller fuktiga omgivning samt starkt solljus/värme.

Om produkten skulle bli smutsig, torka den då med en fuktig trasa (ej våt!). Använd inga lösningsmedel eller starka rengöringsmedel.

# Anteckningar

# Anteckningar

---

Återförsäljare

Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter. 1969 lanserade vi världens första slingförstärkare med true constant current under varumärket Univox®. Vårt mål är att med en hög servicegrad erbjuda våra kunder högkvalitativa hörselprodukter genom att ständigt söka nya vägar för att få fram förbättrade produkter ur både användar- och miljösynpunkt.

---

Bo Edin AB, Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö | [www.edin.se](http://www.edin.se) | [www.hörbutiken.se](http://www.hörbutiken.se) / [www.hoerbutiken.se](http://www.hoerbutiken.se)

---

Hearing excellence since 1965

