



Art nr 110101

Innehåll

Introduktion	3
Nätanslutning.....	3
Batteridrift.....	3
Översikt	4
Användning.....	5
Sätt på/stäng av högtalaren	6
Placering av högtalaren	6
Ljud	7
Inbyggda ljud	7
Använda ljudkort	7
FCC certifierade produkter	8
Säkerhetsföreskrifter/Garanti	9
Underhåll och skötsel.....	9
Felsökning	9
Teknisk information och service	9
Miljö och återvinning	10

Introduktion

Tack för att du har valt att köpa en S-550 ljudterapihögtalare som kan underlätta för dig med besvär av tinnitus. Vi hoppas att du kommer att bli nöjd med produkten.

Vänligen läs igenom hela bruksanvisningen innan du använder produkten.

Förpackningens innehåll:


- 1 x ljudterapihögtalare
- 1 x nätadapter, med bilagd svensk plugg, bild A

Din högtalare kan drivas med en nätadapter (ingår) eller med 4 AA-batterier (ingår ej).

Nätanslutning

Anslut den bifogade nätadaptern till nätadapteringången (9) på sidan av enheten och anslut nätadaptern till ett vägguttag. När högtalaren är ansluten, kommer den inte att dra någon ström från batterierna så länge den är ansluten via nätadaptern.

Om ett strömavbrott inträffar, kommer högtalaren automatiskt att växla över till batteridrift.


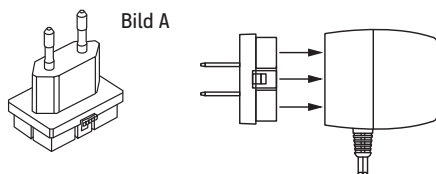


Batteridrift

För att installera batterier:

1. Öppna batterifacket på undersidan av högtalaren (10)
2. Sätt i 4 st AA alkaliska batterier enligt märkningen i batterifacket
3. Sätt tillbaka batteriluckan

Översikt

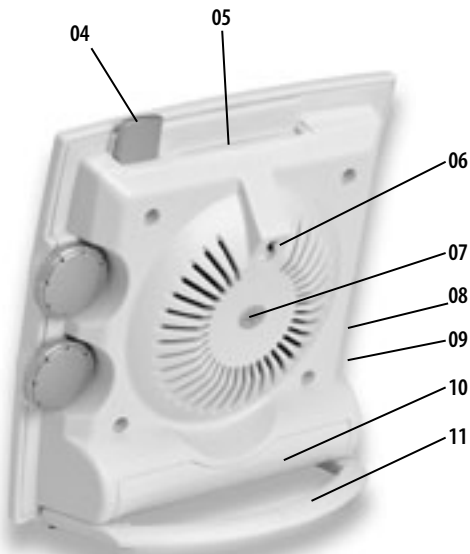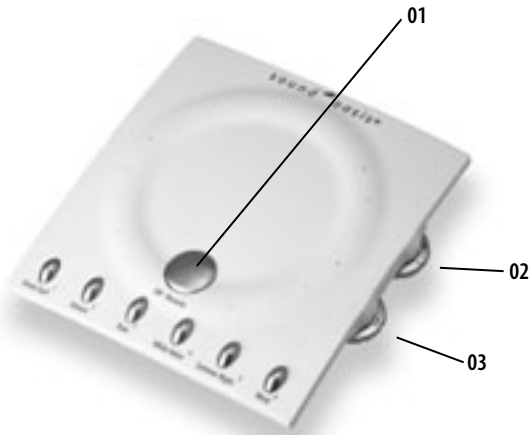

1. På/Av (Off - Resume)
2. Volym
3. Timer (Cont., 30 min, 60 min, 90 min)
4. Ljudkortsknapp
5. Ljudkortsplats
6. Väggfäste
7. Rundstrålande högtalare
8. Uttag för hörlurar eller högtalarkudde (tillbehör)
9. Nätagadapteringång
10. Batterifack
11. Av-/påtagbart bordsstöd

Användning

1. Sätt i batterierna i batterifacket (10) på undersidan av enheten eller anslut nätadaptern till högtalaren (9). Nu är din högtalare klar att användas.
2. Ett på- och avtagbart bordsstöd följer med i förpackningen. Se översiktsbilden för åt vilket håll bordsstödet ska sitta. Sätt in stödets krokar i hålen på undersidan av högtalaren. Följ pilarna på bordsstödet och skjut fast det i pilarnas riktning.
3. Sätt på högtalaren genom att vrida på **Volym** (2) till önskad volymnivå. När högtalaren slås på första gången, kommer den automatiskt att spela upp ljud 1 - Ocean Surf (fabriksljudinställning).
Tryck på någon annan av ljudknapparna, nr 1-6, för att välja ett annat ljud.

Välj hur lång tid du vill att ljudet ska spelas upp genom att vrida på

Timer (3) till önskad inställning. 4 lägen finns tillgängliga;

- **Cont.**, för uppspelning utan tidsbegränsning

- **30 min**, för spelning i 30 minuter

- **60 min**, för spelning i 60 minuter

- **90 min**, för spelning i 90 minuter

I timerläge 30-, 60- och 90-minuter tonar ljudet gradvis bort de sista 12 minuterna innan högtalaren stängs av automatiskt.

4. Utöver **timerfunktionen** (3) kan högtalaren stängas av manuellt genom att:
 - vrida **Volym** (2) eller genom att
 - trycka på På/Av-knappen **Off-Resume** (1)

Notera

Vänta minst 15 sekunder innan du slår på högtalaren efter att du stängt av den med **Volym** (2), detta för att invänta återställning av högtalarens datorstyrda elektronik. Om så ej sker, kan en blandning av flera ljud spelas upp.

Sätt på/stäng av högtalaren

- På/Av-knappen **Off-Resume** (1) på framsidan av högtalaren tillåter dig att bekvämt stänga av enheten under en ljuduppspelning eller för att repetera den senaste spelade ljudsekvensen.
- Genom att trycka på På/Av-knappen **Off-Resume** (1) en gång under ljuduppspelningen, stängs ljudet av automatiskt utan att du behöver stänga av högtalaren med **Volym** (2).
- Genom att trycka på På/Av-knappen **Off-Resume** (1) två gånger upprepas det senaste ljudvalet med samma volym och timerinställning.

Exempel

Om du lyssnar på ljud 1, Ocean Surf, på halv volym på 60 minuters **timerläge** (3), och trycker ytterligare en gång på På/Av-knappen **Off-Resume** (1), stängs högtalaren av. Trycker du åter igen på På/Av-knappen **Off-Resume** (1) så upprepas uppspelningen automatiskt och en hel sekvensens av ljud 1, Ocean Surf, spelas på halv volym för en ny 60-minutersperiod.

Placering av högtalaren

Utformningen av högtalaren gör att den kan placeras plant på rygg, hängas upp med **väggfästet** (6) eller placeras i upprätt läge på ett plant underlag med **bordsstödet** (11) för att spara utrymme.

För att placera högtalaren på rygg – ta bort **bordsstödet** (11) genom att dra det bakåt.

Notera

Det avtagbara **bordsstödet** (11) tillåter dig även att spara bagageutrymme när du reser.

Använd hörlurar eller högtalarkudde (dessa ingår ej) för att lyssna på ljud och koppla av.

Högtalaren har en 3,5 mm audioingång för hörlurar eller högtalarkudde.

Ljud

Inbyggda ljud

Högtalaren innehåller 6 digitalt inspelade ljud. Välj mellan Ocean Surf, Stream, regn, White Noise, sommarnatt och vind.

1. **Ocean Surf**

Havsvågor ger en lugn rytm som hjälper dig att somna och skapa en avkopplande strandkänsla.

2. **Stream**

En porlande fjällbäck hjälper dig att varva ner och skapar en utmärkt ljudbakgrund för dagliga aktiviteter i hemmet eller på kontoret.

3. **Regn**

Ett stilla regn ger en lugn miljö för avkoppling och sömn. Duschljud är särskilt bra på att maskera högre toners bakgrundsbrus.

4. **White Noise**

"Vitt brus" för maskering av besvär orsakade av tinnitus.

5. **Summer Night**

En mild kör av syrsor ger en stilla och vilsam miljö.

6. **Vind**

Lugna vindar sveper dig bort till en vilsam naturmiljö.

Använda ljudkort

Du kan enkelt lägga till ytterligare 6 ljud till högtalaren med ett annat Sound Oasis ljudkort (tillbehör). Följ dessa steg för att använda andra ljudkort:

1. Sätt i ett ljudkort i **ljudkortsfacket** (5) så att indikatorpilen på kortet förs in i ljudkortsfacket först och med ljudkortets framsida vänd åt samma håll som högtalarens framsida.
2. Tryck ner ljudkortet tills du känner att det når botten, ca 10 mm ner i ljudkortsfacket.
3. För att spela upp ljud från ljudkortet, tryck på **ljudkortsknappen** (4) bredvid ljudkortet. Ljudkortsknappen skjuts upp för att indikera att ljud spelas från ljudkortet.

4. Tryck på den ljudknapp, nr 1-6, på högtalarens framsida för det ljudnummer som du vill lyssna på från ljudkortet.

Exempel

Om du vill lyssna till ljud 5 på ljudkortet, tryck på ljudknapp 5 på framsidan av högtalaren. Högtalaren spelar upp ljudet.

5. För att avaktivera ljudkortsfunktionen, tryck **ljudkortsknappen** (4). Ljudkortsknappen sänks då ned för att indikera att ljudkortet inte längre är aktiverat. Du kan sedan lyssna på ljuden som är inbyggda i din Sound Oasis på vanligt sätt.

Varning

- Rör inte vid metallkontakten på ljudkortet. Vidrör dessa elektriska kontakter med statiskt laddade föremål, inklusive fingrarna, kan ljud raderas på ljudkortet.
- Förvara kortet i kortförpackningen för att skydda kortets elektriska kontakter från damm och smuts när du tagit ut ljudkortet ur högtalaren.
- Utsätt inte ljudkortet för klämrisk, tunga föremål, värme, kyla eller vätskor

Säkerhetsföreskrifter/Garanti

Observera att produktgarantin ej omfattar fel som uppstått genom ingrepp i produkten, ovarsamhet, felaktig inkoppling/montering eller underhåll.

Använd inte produkten med annan nätadapter än den som levereras med produkten och använd de batterier som tillverkaren rekommenderar.

Tillverkaren ansvarar inte för störningar från radio eller TV vid användning av produkten.

Underhåll och skötsel

Hantera produkten med varsamhet för att förlänga livstiden.

Placera inte produkten där den utsätts för vatten eller fuktiga eller dammiga omgivningar samt starkt solljus/värme.

För bästa resultat, använd endast de batterier tillverkaren rekommenderar. Byt alltid ut gamla eller svaga batterier.

Om produkten skulle bli smutsig, torka den då med en lätt fuktad trasa (ej våt!). Använd inga lösningsmedel eller starka rengöringsmedel.

Felsökning

Kontrollera att nätadapter/batterier är rätt anslutna/isatta. Vänligen kontakta försäljningsstället om produkten trots ovanstående åtgärder inte fungerar.

Teknisk information och service



För kompletterande upplysningar hänvisar vi till datablad/broschyr och CE-certifikat som kan laddas ner från www.edin.se.

Vid behov av ytterligare teknisk information, kontakta försäljningsstället eller Bo Edin AB på support@edin.se.

Miljö och återvinning



Släng förbrukade batterier/produkt enligt gällande miljöföreskrifter.

Bo Edin AB är anslutna till FTI (fd REPA) och El-kretsen.

Om du följer ovanstående önskemål om återvinning medverkar du till en bättre miljö.

Återförsäljare

Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter. 1969 lanserade vi världens första slingförstärkare med true constant current under varumärket Univox®. Vårt mål är att med en hög servicegrad erbjuda våra kunder högkvalitativa hörselprodukter genom att ständigt söka nya vägar för att få fram förbättrade produkter ur både användar- och miljösynpunkt.

Bo Edin AB, Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö

| www.edin.se

| www.hörbutiken.se /
| www.hoerbutiken.se

Hearing excellence since 1965

