

Univox[®] Digi RS-R

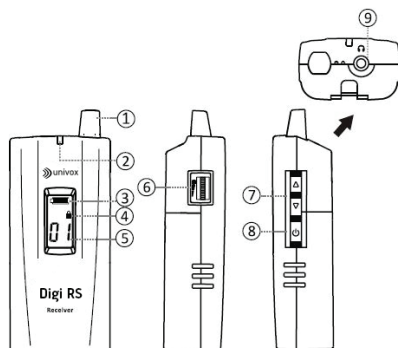
Fickmottagare

Bruksanvisning





Mottagare

1. Antenn
2. Batteri-/signalindikator LED
3. Status batteri LCD
4. Låsning av kanal LCD
5. Vald kanal LCD
6. Volym
7. Upp/Ned-knapp
8. Strömbrytare
9. Hörlursuttag



Strömbrytare

- Tryck ned och håll strömbrytaren  nedtryckt i 1 sekund för att starta mottagaren. **On** visas i LCD-skärmen och därefter den sist använda kanalen.
- Tryck ned och håll strömbrytaren  nedtryckt i 2 sekunder för att stänga av mottagaren. **Off** visas i LCD-skärmen och därefter slocknar skärmen.

Energispar

Mottagaren stängs av om den inte tar emot en signal inom 20 minuter.

Kanalsynkronisering av sändare och mottagare

Vid synkronisering ska enheterna vara högst en meter från varandra.

- Tryck ned sekretessknappen på sändaren innan den startas.
- Slå på sändaren. Den lila LED-lampan blinkar vilket indikerar att funktionen för synkronisering av kanaler är aktiverad. Ställ in önskad kanal.
- Slå på mottagaren/mottagarna för att synkronisera dem. En eller flera mottagare kan synkroniseras samtidigt.
- När kanalerna har synkroniserats visar mottagaren samma kanal som sändaren och LED-lampan lyser med fast blått sken.
- Tryck ned sändarens sekretessknapp för att gå ut ur synkroniseringsfunktionen. När sändaren lämnat synkroniseringsfunktionen stängs ljudet av när sekretessknappen trycks ned.

OBS! Om synkroniseringen misslyckas

1. Slå av sändaren och följ ovanstående procedur för att göra om synkroniseringen.
2. Om det fortfarande inte fungerar, stäng även av mottagaren/mottagarna och gör om hela synkroniseringsproceduren enligt ovan.

Batteri- och signalindikering

LED-indikator		Sändare	Mottagare
Blinkande sken	<i>Röd</i>	Sekretess aktiverad <i>Låg batterinivå</i>	-
	<i>Blå</i>	Sekretess aktiverad <i>Batterinivå OK</i>	-
	<i>Lila</i>	Kanalsynkronisering aktiverad	-
Fast sken	<i>Röd</i>	Signal översänd <i>Låg batterinivå</i>	Signal mottagen <i>Låg batterinivå</i>
	<i>Blå</i>	Signal översänd <i>Batterinivå OK</i>	Signal mottagen <i>Batterinivå OK</i>
Ingen LED		Enheten är avstängd	Enheten är avstängd/ Signal ej mottagen

Tekniska data

Frekvensområde	821-832 och 863-865MHz (fullt spektrum 510-937MHZ, landsberoende)
Kanaler	32 valbara
Modulation	4 GFSK
Fördröjning	< 5 ms
Audio process	Compander
Dynamikområde	> 70 dB
SNR (Signal/störförh.)	> 65 dB
T.H.D. (distorsion)	< 3%
Kanalpositionering	Ja
Räckvidd	upp till 50 m i fritt fält med ficksändare upp till 100m i fritt fält med stationär sändare
Temperatur	-10°C - + 60°C
Känslighet	-110 dBm
Hörlursuttag	3,5 mm
Batterier	1 x 1,2V 2100mA Ni-MH uppladdningsbart AA-batteri eller 1 X 1,5V alkaliskt AA-batteri
Batteritid	> 15 timmar
Uppladdningstid	Cirka 8 timmar
Storlek (DxBxH)	24x40x100 mm (med antenn)
Vikt	70 g (inkl. batteri)

Underhåll

Produkten kräver normalt sett inget underhåll. Om enheten skulle bli smutsig, torka den då med en ren fuktig trasa. Använd inga lösningsmedel eller rengöringsmedel. Hantera produkten med varsamhet för att förlänga livstiden.

Säkerhetsföreskrifter/garanti

Produkten omfattas av 2 års garanti. Observera att produktgarantin inte omfattar fel som uppstått genom ingrepp i produkten, ovarsamhet, felaktig inkoppling/montering eller underhåll. Använd inte produkten med andra batterier än de som levereras med produkten.

Service

Om produkten, trots felsökning i enlighet med bruksanvisningen, inte fungerar, ska du kontakta försäljningsstället.

För produkt som är köpt direkt av Bo Edin AB, vänligen kontakta support@edin.se.

Miljö och återvinning



Släng förbrukade batterier/produkt enligt gällande miljöföreskrifter.

Bo Edin AB är anslutna till FTI (fd REPA) och El-kretsen.

Om du följer ovanstående önskemål om återvinning medverkar du till en bättre miljö.

Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter, som Univox hörslinge-, IR- och FM-system. Vi erbjuder även hörselprodukter för personligt bruk på den svenska marknaden. Med fokus på utveckling av nya, innovativa och tekniska lösningar vill vi bidra till att höja livskvaliteten för de miljontals människor med nedsatt hörsel som finns runt om i världen.

Bo Edin AB
Besöksadress

Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö
Förrådsvägen 2B, 181 41 Lidingö

Tel: 08 7671818
Fax: 08 7671820

Email: info@edin.se
Webb: www.edin.se