

amplicomms

PowerTel 196





ANVÄNDARMANUAL

INNEHÅLL

BESKRIVNING AV TELEFONEN PowerTel 196	4
INSTALLATION	5
Rekommendationer	5
Telefoninstallation	5
Väggmontering	5
Observera	6
NORMAL ANVÄNDNING	6
Påbörja ett samtal	6
Ring upp från minnen	6
Återuppringning	6
Svara på ett samtal	7
Ställ in volym för högtalare	7
Ställ in ringvolym	7
Ställ in telefonlurens volym (och ljudförstärkning)	7
Equalizer	7
PROGRAMMERING	8
Välj språk	8
Ange kontrast	8
Ställ in blinkningstid	8
Ringsignal	8
Knapptoner	9
Bekräftelse-toner	9
Software-version	9
Uppringningsläge	9
Återställ	10
Ställ in direktminnen M1/M2/KNAPP1	10
Ta bort en post	10
Kopiera en kontakt eller ett nummer från samtalslistan till M1/M2/ KNAPP1	10
Telefonbok	11
Visa eller ring upp en post	11

Redigera namn eller nummer -----	11
Ta bort en post -----	12
Ta bort alla kontakter -----	12
Minnesstatus -----	12
Nummerpresentation och samtalslista -----	12
Nummerpresentatör -----	12
Samtalslista -----	12
Visa samtalslistan -----	13
Ring upp en nummer i samtalslistan -----	13
Kopiera ett nummer från samtalslistan till telefonboken -----	13
Ta bort en post -----	13
Ta bort hela samtalslistan -----	13
Datum och tid -----	14
Ställ in datum och tid -----	14
Ställ in tidsformat -----	14
Hjälp -----	15
Ingen kopplingston -----	15
Ingen ringsignal -----	15
Nummerpresentationen fungerar inte -----	15
En post kan inte sparas i telefonboken -----	15
Tom display -----	15
GARANTI -----	16
SÄKERHET -----	18
MILJÖ -----	18
EFTERLEVNAD -----	18

BESKRIVNING AV TELEFONEN PowerTel 196

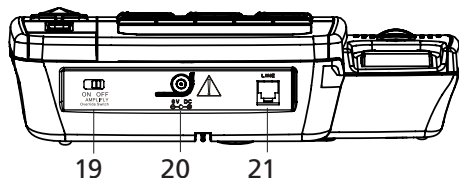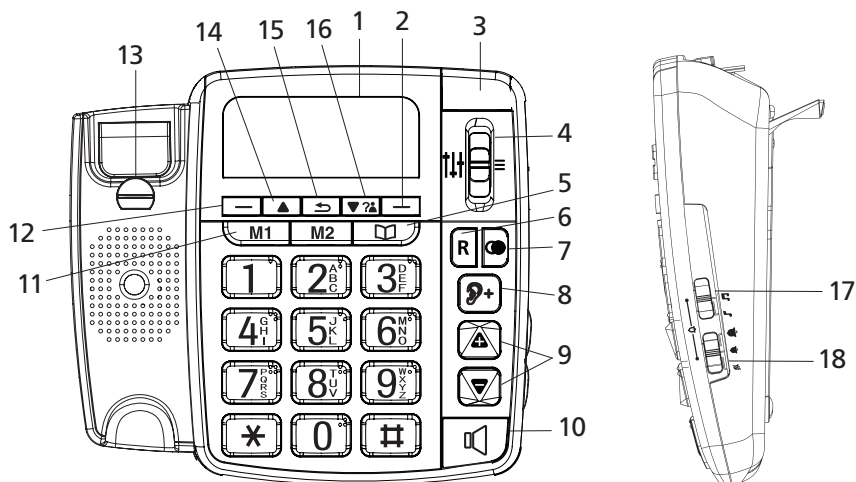

1. LCD-skärm
2. Höger programknapp
3. Signallampa (inkommande samtal)
4. Telefonlurens equalizer
5. Telefonboks-knapp
6. Blinkningsknapp
7. Återuppringningsknapp
8. Ljutförstärkare (förstärker telefonlurens volym)
9. Hög/sänk volym på högtalare eller telefonlur
10. Högtalarknapp
11. Två snabbknappar för direktminne (M1 och M2)
12. Vänster programknapp
13. Upphängningsknapp
14. Upp
15. Tillbaka-knapp
16. Ned/Nummerpresentation
17. Ringsignalton
18. Ringvolymkontroll
19. FÖRSTÄRK standardinställning
20. 6 V strömförsörjning
21. Telefonsladdkontakt


INSTALLATION

Rekommendationer

- Utsätt inte telefonen för direkt solljus eller extrema temperaturer.
- Används i temperaturer mellan + 5 ° C och + 40 ° C.
- Din telefon måste installeras minst 1 meter bort från radioutrustning såsom TV-apparat, mobiltelefon etc.

Telefoninstallation

- Telefonen bör placeras på en plan yta för ökad stabilitet. Anslut den spiralformade sladden i telefonluren (A) och i kontakten på telefonens vänstra sida (B).
- Anslut strömadapterns mindre ände i telefonens elkontakt(D).
- Anslut strömadapterns större ände i ett vägguttag (E).
- Anslut telefonsladden i uttaget på telefonens baksida, och i vägguttaget (C) eller i telefonkontakten på internetdosan. Höj upp de två benen på telefonens undersida (F) för skrivbordspositionering.

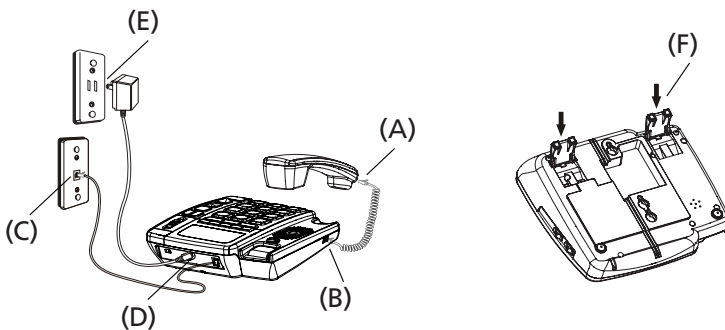

Väggmontering

- Fäll in de två benen under telefonen (F).
- Vänd den lilla plastbiten vid klykan (13).
- Borra två 6 mm breda hål med 100 mm mellanrum. Sätt in två skruvpluggar och skruva i träskruvarna (3.5 mm diameter och 30 mm långa).
- Montera telefonen på de två skruvarna genom att föra den nedåt.

Observera

Använd endast den 6.0 V strömadapter som levereras med telefonen.
Strömadaptern av modell: HJ-0600400P1-EU eller HJ-0600400A1-UK
Tillverkare: Shenzhen Huajin Electronic Co., Ltd.
Ingångseffekt: 100-250 V ; 50/60 Hz ; 0.15 A max. Uteffekt: 6.0 V ; 400 mA

ELLER



Strömadapter av modell: AT-337E-060045A eller AT-536B-060045B
Tillverkare: Shenzhen Baijunda Electronic Co., Ltd.
Ingångseffekt: 100-240 V ; 50/60 Hz ; 0.2 A max.
Uteffekt: 6.0 V ; 450 mA

För ELEKTRISKT ANSLUTEN UTRUSTNING gäller att de ska vara anslutna till ett vägguttag som finns nära utrustningen och är lättillgängligt.

NORMAL ANVÄNDNING

PT196 är en telefon med FULL DUPLEX som låter dig njuta av simultan tvåvägskonversation helt utan någon rundgång, varken i telefonluren under vanliga samtal eller vid högtalarsamtal.





Påbörja ett samtal

- Lyft luren, eller tryck på knappen .
- Slå numret med knappsatsen.
- För att avsluta samtalet: Sätt tillbaka telefonluren i klykan eller tryck på knappen .



Ring upp från minnen

- Lyft luren, eller tryck på knappen .
- Tryck på  ,  eller  +  /  + Ring.
- Vid samtalets slut, sätt tillbaka luren i klykan eller tryck på knappen .

Återuppringning



- Tryck på knappen .
- Tryck på  eller  för att välja nummer.
- Lyft luren, eller tryck på knappen .

Svara på ett samtal

- För att svara: Lyft luren eller tryck på knappen  (högtalarläge).
- För att lägga på: Sätt tillbaka luren i klykan eller tryck på knappen .

Ställ in volym för högtalare

Under (högtalar-) samtal:

- Tryck på  för att öka volymen.
- Tryck på  för att minska volymen.
- Det finns 8 ljudnivåer att välja mellan.

Ställ in ringvolym



Skjut reglaget för att ange ringvolymen   .

Obs: När ringsignalen är avstängd, kommer samtalslampan ändå att blinka för att signalera ett inkommande samtal.


Ställ in telefonlurens volym (och ljudförstärkning)

Under pågående samtal kan två förstärkningslägen användas:

- **Standardläge**

Tryck på  eller  för att öka eller minska (8 nivåer).

- **Ljudförstärkningsläge (extra stark upp till + 60 dB)**


Under samtal med telefonluren, tryck på knappen +. Tryck på denna knapp igen för att avsluta ljudförstärkningen.

Ett skjutreglade på telefonens baksida (19) används för att alltid aktivera ljudförstärkningen. Standardinställningen är "OFF". Om den är i "ON"-läget, kommer ljudförstärkningen att aktiveras automatiskt för varje samtal.

Equalizer


Välj den ljudprofil som passar dig bäst.

Skjut reglaget för att anpassa telefonlurens tonhöjdslägen

(tre alternativ, bas/neutral/diskant) .

PROGRAMMERING


Välj språk

1. Tryck på **Meny**.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja **Inställningar**. Tryck på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja **Språk**. Tryck på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja rätt språk. Tryck på **OK**.
5. Tryck på  för att återgå till vänteläge.

Ange kontrast

1. Tryck på **Meny**.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja **Inställningar**. Tryck på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja **Display-kontrast**. Tryck på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja rätt nivå. Tryck på **OK**.
5. Tryck på  för att återgå till vänteläge.


Ställ in blinkningstid

1. Tryck på **Meny**.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja **Inställningar**. Tryck på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja **Återuppr.tid**. Tryck på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja rätt blinkningstid. Tryck på **OK**.
5. Tryck på  för att återgå till vänteläge.

Ringsignal


Du kan ställa in olika ringsignaler för dina samtal. Välj mellan 20 olika ringsignaler.

Du kommer att höra ett exempel på ringsignalerna när du bläddrar mellan dem.

1. Tryck på **Meny**.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja **Inställningar**. Tryck på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja **Ringsignal**. Tryck på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja rätt ringsignal. Tryck på **OK**.
5. Tryck på  för att återgå till vänteläge.


Knapptoner

När du trycker på en knapp på knappsatsen hörs ett pip. Du kan aktivera och inaktivera dessa ljud.


1. Tryck på **Meny**.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja **Inställningar**. Tryck på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja **Knappsats-toner**. Tryck på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja **Signaler på** eller **av**. Tryck på **OK**.
5. Tryck på  för att återgå till vänteläge.

Bekräftelse-toner


När du bekräftar en inställningar hörs ett pip. Du kan aktivera och inaktivera dessa ljud.

1. Tryck på **Meny**.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja **Inställningar**. Tryck på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja **Bekräftelse-toner**. Tryck på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja **Signaler på** eller **av**. Tryck på **OK**.
5. Tryck på  för att återgå till vänteläge.


Software-version

1. Tryck på **Meny**.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja **Inställningar**. Tryck på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja **för att välja Software-version**. Tryck på **OK**.
4. Software-versionen visas.
5. Tryck på  för att återgå till vänteläge.


Uppringningsläge

1. Tryck på **Meny**.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja **Inställningar**. Tryck på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja **Uppring.-läge**. Tryck på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja **Tonval**. Tryck på **OK**.
5. Tryck på  för att återgå till vänteläge.


Återställ

1. Tryck på **Meny**.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja **Inställningars**. Tryck på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja **Återställ**. Tryck på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja **Återställ inst.** or **Ta bort anv. data**. Tryck på **OK**.
5. Tryck **Ja** för att bekräfta.
6. Tryck på  för att återgå till vänteläge.

Ställ in direktminnen M1/M2/KNAPP1


1. Tryck på **Meny**.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja **Direktminne**. Tryck på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja **M1, M2 eller KNAPP1**. Tryck på **Lägg t** eller **Alt./Redigera/OK**.
4. Ange numret med knappsatsen. Tryck på **Spara**.
5. Tryck på  för att återgå till vänteläge.

Ta bort en post


1. Tryck på **Meny**.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja **Direktminne**. Tryck på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ till posten du vill ta bort. Tryck på **Options**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja **Ta bort**. Tryck på **OK**.
5. Displayen visar **Är du säker?**. Tryck på **Yes**.
6. Tryck på  för att återgå till vänteläge.

Kopiera en kontakt eller ett nummer från samtalslistan till M1/M2/KNAPP1


När M1/M2/KNAPP1 är tomma :

1. Tryck på **Meny**.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja **Direktminne**. Tryck på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja **M1, M2 eller KNAPP1**. Tryck på **Lägg t**.
4. Tryck på **Alt**.
5. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja **Från Kontakter** eller **Från samt. lista**. Tryck på **OK**.
6. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja nummer. Tryck på **Välj**.
7. Tryck på  för att återgå till vänteläge.

Telefonbok

1. Tryck på .
2. När telefonboken är tom :
 - Tryck på **Lägg t**.
 - Ange namn med knappsatsen. Tryck på **Nästa**.

När telefonboken har poster :

- Tryck på **Alt**.
 - Tryck på **▲** eller **▼** för att välja **Lägg t ny kontakt**. Tryck på **OK**.
3. Ange namn med knappsatsen. Tryck på **Nästa**.
 4. Ange numret med knappsatsen. Tryck på **Spara**.
 5. Tryck på  för att återgå till vänteläge.

Att ange namn

Använd bokstäverna på knappsatsen för att ange namn, t ex för att spara Tom:

Tryck på 8 en gång för att ange T.

Tryck på 6 tre gånger för att ange o.

Tryck på 6 en gång för att ange m.



Skrivtips

Tryck på Rensa för att ta bort den senast inskrivna bokstaven eller siffran.



Tryck på 0 för att göra ett mellanslag.

Tryck på # för att byta från stora till små bokstäver, och från bokstäver till siffror.



Visa eller ring upp en post

1. Tryck på .
2. Tryck på **▲** eller **▼** för att välja önskad post.
ELLER
Skriv in den första bokstaven på namnet för att söka alfabetiskt.
3. Lyft på telefonluren för att slå numret,  för att ringa numret med högtalare.



Redigera namn eller nummer

1. Tryck på . Den första posten visas.
2. Tryck på **▲** eller **▼** till posten du vill redigera. Tryck på **Alt**.
3. Tryck på **▲** eller **▼** för att välja **Redigera kontakt**. Tryck på **OK**.
4. Namnet visas. Radera namnet om det behövs. Ange det nya namnet.
Tryck på **Nästa**.
5. Det befintliga numret visas. Radera numret om det behövs. Ange det nya numret. Tryck på **Spara**.
6. Tryck på  för att återgå till vänteläge.



Ta bort en post

1. Tryck på .
2. Tryck på ▲ eller ▼ till posten du vill ta bort. Tryck på **Alt**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja **Ta bort kontakt**. Tryck på **OK**.
4. Displayen visar **Är du säker?**. Tryck på **Ja**.
5. Tryck på  för att återgå till vänteläge.

Ta bort alla kontakter

1. Tryck på . Tryck på **Alt**.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja **Ta bort alla kontakter**. Tryck på **OK**.
3. Displayen visar **Är du säker?**. Tryck på **Ja**.
4. Tryck på  för att återgå till vänteläge.

Minnesstatus

1. Tryck på . Tryck på **Alt**.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja **Minnesstatus**. Tryck på **OK**.
3. Antal lagrade kontakter visas.
4. Tryck på  för att återgå till vänteläge.

Nummerpresentation och samtalslista

Viktigt

Tjänsten nummerpresentation måste ingå i ditt telefonabonnemang för att nummerpresentation ska kunna användas. Det kan innebära en höjd prenumerationsavgift.

Du måste registrera hela telefonnumret, inklusive riktnummer, i telefonboken för att en uppringares namn ska kunna visas vid nummerpresentation.





Nummerpresentatör

Om du har en prenumeration med nummerpresentation, kommer uppringarens nummer att visas (om det inte är dolt) innan ett samtal besvaras.






Samtalslista

Samtalslistan lagrar information om de 30 senast mottagna, missade och uppringda samtalen, inklusive telefonnummer och samtalets datum.








Visa samtalslistan

1. Tryck på   för att öppna samtalslistan. Om det inte finns några samtal i listan visar displayen **Lista tom**.
2. Tryck på  eller  för att skrolla i listan.
3. När du når listans slut visar displayen **---Slut---**

Ring upp en nummer i samtalslistan








1. Tryck på   för att öppna samtalslistan.
2. Tryck på  eller  till den önskade posten.
3. Lyft på telefonluren för att slå numret,  för att ringa numret med högtalare.

Kopiera ett nummer från samtalslistan till telefonboken






1. Tryck på   för att öppna samtalslistan.
2. Tryck på  eller  till den önskade posten. Tryck på **Options**.
3. Tryck på  eller  för att välja **Spara nummer**. Tryck på **OK**.
4. Ange namnet. Tryck på **Nästa**.
5. Ändra numret om det behövs. Tryck på **Spara**.
6. Tryck på  för att återgå till vänteläge.

Se sektionerna 'Att ange namn' och 'Skrivtips'.

Ta bort en post

1. Tryck på   för att öppna samtalslistan.
2. Tryck på  eller  till den önskade posten. Tryck på **Options**.
3. Tryck på  eller  för att **Ta bort samtal**. Tryck på **OK**.
4. Tryck på  för att återgå till vänteläge.

Ta bort hela samtalslistan


1. Tryck på   för att öppna samtalslistan. Tryck på **Alt**.
2. Tryck på  eller  för att **Ta b. alla samtal**. Tryck på **OK**.
3. Displayen visar **Är du säker?**. Tryck på **Ja**.
4. Tryck på  för att återgå till vänteläge.

Datum och tid

Tid och datum ställs in automatiskt, om du har en prenumeration med nummerpresentation, när du tar emot ditt första samtal.


Du kan ställa in tid och datum själv om du inte har en prenumeration med nummerpresentation.

Ställ in datum och tid

1. Tryck på **Meny**.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja **Tid & datum**. Tryck på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja **Ställ tid & datum**. Tryck på **OK**.
4. Ange tiden med knappsatsen (t ex 06--30 för kl 06:30). Tryck på **Nästa**.
5. Använd knappsatsen för att ange datum med formatet DD/MM/ÅÅÅÅ.
Tryck på **Spara**.
6. Tryck på  för att återgå till vänteläge.

Ställ in tidsformat

Din telefon kan visa tid med tidsformaten 24 timmar eller 12 timmar. För att ställa in ditt val:

1. Tryck på **Meny**.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja **Ställ tid & datum**. Tryck på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja **Tidsformat**. Tryck på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja **12 timmar** eller **24 timmar**. Tryck på **OK**.
5. Tryck på  för att återgå till vänteläge.

Hjälp

Ingen kopplingston

- Använd bara telefonsladden som levererades med telefonen.
- Kontrollera att telefonsladden är ordentligt ansluten.

Ingen ringsignal

- Ringsignalen är inaktiverad.
- Öka volymen.

Nummerpresentationen fungerar inte

- Kontrollera din prenumeration hos din leverantör.

En post kan inte sparas i telefonboken

- Telefonboken är full. Radera en post för att frigöra minne.

Tom display

- Försök att koppla ur och koppla in strömkabeln igen.

Denna telefon är utformad för analog telefoni och fungerar därmed inte med IP-telefoni. För eventuell åtgärd, kontakta er teleoperatör.

GARANTI

Läs noggrant igenom den användarguiden i denna låda. PowerTel 196 är godkänd utrustning i enlighet med Europeiska krav, som intygad med CE-märkning. Produkten du just köpt är en teknologisk produkt, och måste hanteras varsamt.

Obs: Du har en lagstadgad garanti på denna produkt i enlighet med de lagar och regler som gäller för försäljningen av konsumtionsvaror i det land där du genomförde köpet.

Kontakta din leverantör för mer information om denna lagstadgade garanti. Oavsett produktens lagstadgade garanti, garanterar ATLINKS att produkten i denna låda stämmer överens med de tekniska specifikationer som beskrivs i användarhandboken i denna förpackning, och detta under en garantiperiod, räknat från produktens ursprungliga inköpsdatum, datumet på din faktura eller ditt kvitto där återförsäljarens namn anges, och i totalt: Tjugofyra (24) månader för telefonen, inklusive förbrukningsvaror, tillbehör och batterier. För att åberopa denna garanti under garantiperioden måste du returnera hela produkten till din återförsäljare, tillsammans med köpbeviset, fakturan eller kvittot på köpet från din återförsäljare, som visar inköpsplatsen och produktens serienummer, efter att defekten uppstått eller upptäckts. ATLINKS företar sig att reparera alla defekta föremål till följd av fel i konstruktion, material eller utförande, på egen bekostnad, eller att ersätta, på egen bekostnad, med en identisk eller likvärdig del beträffande funktion och prestanda. Om reparation eller ersättning inte är möjligt under normala affärsmässiga förhållanden, kommer produkten att återbetalas eller ersättas med en likvärdig produkt. Inom den maxgräns som tillåts under gällande lag, garanteras ersättningsprodukten eller delen - som kan vara ny eller upprustad - under en period på nittio (90) dagar från reparationsdatum eller fram till slutet på den ursprungliga garantiperioden, om det inträffar tidigare än nittio (90) dagar, med tillägget att den tid som produkten är obrukbar eller minst sju (7) dagar kommer att läggas till kvarvarande garantiperiod. Denna garanti gäller inte i följande fall:

- Installation eller användning som inte överensstämmer med instruktionerna i användarhandboken,
- Felaktion anslutning eller onormal användning av produkten, speciellt med inkompatibla tillbehör, som angivna i användarhandboken,
- Produkten har öppnats, modifierats eller bytts ut med icke godkända delar, serienummer som är borttaget, oläsligt, skadad,
- Normalt slitage, inklusive normalt slitage på tillbehör, batterier och display,
- Underlåtenhet att uppfylla tekniska och säkerhetsnormer gällande på den plats där produkten används,
- Produkten har utsatts för stöt eller fall,

- Produkten har skadats av blixn, elektriska överspänning, hetta eller strålning, vattenskada, utsatts för abnorma temperaturer, fukt eller annan extrem miljö eller annan orsak extern till produkten,
- Försumlighet eller felaktigt underhåll,
- Ingripande, modifikation eller reparation utförd av personal som ej godkänts av ATLINKS.

Om den returnerade produkten inte täcks av garantin, kommer du att få en offert från reparatören som specificerar kostnad för bedömning och transport av produkten, och som måste betalas om du önskar få produkten tillbakaskickad till dig. Denna garanti är giltig i det land där du köpte produkten, givet att landet är medlem av Europeiska Unionen. Beroende på gällande rättsliga bestämmelser är alla garantier som ej är beskrivna häri uttryckligen exkluderade.

TILL HÖGSTA LAGLIGT TILLÅTNA GRAD,

- A) ÄR DENNA GARANTI EXKLUDERANDE FÖR ALLA ANDRA GARANTIER SOM UTTRYCKTS ELLER ANTYTTTS, INKLUSIVE, MEN EJ BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER AV SÄLJBARHET ELLER PASSLIGHET FÖR VISST SYFTE;
- B) ATLINKS FRISKRIVS ANSVAR FÖR FÖRLUST ELLER FÖRVRÄNGNING AV DATA, FÖRLUST AV ANVÄNDNINGSMÖJLIGHET, FÖRLUST AV CHANS TILL ELLER INKOMST, FÖRLUST AV BRUKBARHET, SKADA SOM ÄR INDIREKT, PÅFÖLJANDE ELLER OFÖRUTSEDD;
- C) ATLINKS ANSVAR ÄR BEGRÄNSAT TILL PRODUKTENS KÖPVÄRDE BORTSETT FRÅN ALLVARLIGT ELLER OAVSIKTLIGT FEL OCH BORTSETT FRÅN KROPPSLIG SKADA

SÄKERHET

Använd inte din telefon för att rapportera gasläcka eller annan explosionsrisk. Försök inte att öppna telefonen för att undvika elstötar. Din telefon måste installeras på en torr plats, långt från hetta, fukt och direkt solljus.

MILJÖ



Denna symbol innebär att kasserad produkt måste samlas in separat från och ej blandat med hushållsavfall.

■ Hjälp oss bevara den miljö vi lever i!

EFTERLEVNAD



Logotypen som tryckts på produkten visar efterlevnad med alla nödvändiga krav och tillämpbara direktiv. Du kan ladda ned Declaration of Conformity (beskrivning av regelefterlevnad) från vår hemsida: www.amplicomms.com

www.amplicomms.com

ATLINKS Europe
147 avenue Paul Doumer
92500 RUEIL-MALMAISON France
RCS Nanterre 508 823 747

© ATLINKS 2020 - Kopiering förbjuden.

Tillverkaren reserverar sig rätten att ändra specifikationerna för sina produkter för att göra tekniska förbättringar eller i överensstämmelse med nya bestämmelser.

AMPLICOMMS och ATLINKS är registrerade varumärken.

PowerTel 196
A/W No.: 10002321 Rev.0 (SWE)
Tryckt i Kina