



Art nr 283103

Univox
Stockby Hantverksby 3
181 75 Lidingö

08-767 18 18
info@edin.se
www.edin.se

ANVÄNDARMANUAL

En induktiv halsslinga är ett personligt hörhjälpmedel för personer med nedsatt hörsel som bär hörapparater utrustade med T-spole. Varje hörapparat är konfigurerad med anpassad frekvensrespons och dynamiskt omfång för användarens specifika hörselnedsättning. NL-100 överför kristallklart ljud från den anslutna enheten, anpassat för användaren och med minimal fördröjning.

Univox® NL-100

Univox® NL-100 kan anslutas till och ta emot signaler från olika ljudkällor. NL-100 summerar vänster och höger kanal och säkerställer att användaren inte missar ett ord. NL-100 levereras med en 70 cm förlängningskabel.

Anslutning och information

Hur du använder NL-100:

- Bär slingan över huvudet runt halsen
- Anslut slingan till hörlursuttaget på enheten du vill använda
- Ställ hörapparaten i teleläge (T-läge)
- Justera volymen på din enhet

OBS! Vi rekommenderar att du ställer in din enhet på lägsta volym innan du ansluter halsslingan för att undvika plötsliga ljud som kan skada din hörapparat.

Underhåll, skötsel och service

Under normala omständigheter behöver produkten inget speciellt underhåll. Torka av enheten med en ren fuktig trasa. Använd inga lösningsmedel eller rengöringsmedel. Kontrollera med jämna mellanrum kablar och kontakter för eventuella skador. Om enheten inte fungerar som förväntat, kontakta din återförsäljare för ytterligare instruktioner.

Miljö och återvinning

Behandla förbrukad produkt enligt gällande miljöföreskrifter. Bo Edin AB är anslutna till FTI och EL-kretsen. Om du följer ovanstående önskemål om återvinning medverkar du till en bättre miljö.

Tekniska specifikationer

Resistans		2 x 12,5 Ohm
Känslighet		0dB @ 55mVrms
Frekvensrespons		50Hz-15kHz, -3dB, rel. 1kHz
Anslutning		3,5 mm kontakt
Dimensioner	Omkrets	74 cm
	Anslutningskabel	20 cm
	Förlängningskabel	70 cm
Vikt (netto)		20 g inkl. förlängningskabel
Art nr		283103

